

# FieldCare, DeviceCare

## 시작 안내서



# 1 변경 이력

제품 버전	문서	변경 사항/설명
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FieldCare: 2.13.xx</li> <li>▪ DeviceCare: 1.05.xx</li> </ul>	KA01303S/04/A2/04.18	새 제품 버전 DeviceCare: 새 제품 버전
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FieldCare: 2.14.xx</li> <li>▪ DeviceCare: 1.06.xx</li> </ul>	KA01303S/04/A2/05.19	새 제품 버전
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FieldCare: 2.14.xx</li> <li>▪ DeviceCare: 1.07.xx</li> </ul>	KA01303S/04/A2/06.20	새 설정(새 구성요소) DeviceCare: 새 제품 버전
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FieldCare: 2.15.xx</li> <li>▪ DeviceCare: 1.07.xx</li> </ul>	KA01303S/04/A2/07.20	새 FieldCare 제품 버전 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 소프트웨어 라이선스 관리</li> <li>▪ DVD를 USB 스틱으로 대체</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FieldCare: 2.16.xx</li> <li>▪ DeviceCare: 1.07.xx</li> </ul>	KA01303S/04/EN/08.22-00	섹션 4.3: 소프트웨어 업데이트 서비스 관련 정보
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FieldCare: 2.17.xx</li> <li>▪ DeviceCare: 1.07.xx</li> </ul>	KA01303S/04/EN/09.22-00	새 FieldCare 제품 버전 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FDI Package 지원</li> <li>▪ 보안 업데이트</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FieldCare: 2.18.xx</li> <li>▪ DeviceCare: 1.07.xx</li> </ul>	KA01303S/04/EN/10.23-00	새 FieldCare 제품 버전 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Windows 11 지원</li> <li>▪ Microsoft SQL Server 2022 Express</li> <li>▪ FDI Package 지원 업데이트, Endress+Hauser 및 타 제조업체</li> <li>▪ PROFINET CommDTM 업데이트</li> <li>▪ CDI CommDTM 업데이트</li> <li>▪ 유량 검증 DTM 업데이트</li> <li>▪ 구성요소의 보안 업데이트</li> <li>▪ 보안 매뉴얼 SD03193S</li> <li>▪ 카탈로그 업데이트, B&amp;R 스캐닝 및 IO-Link 개선</li> <li>▪ W@M 포털이 2023년 12월 31일에 종료됨에 따라 W@M 기능 삭제</li> </ul>

제품 버전	문서	변경 사항/설명
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FieldCare: 2.19.xx</li> <li>▪ DeviceCare: 1.08.xx</li> </ul>	KA01303S/04/EN/11.24-00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FXA291 통신 드라이버 업데이트 V2.12.36.4</li> <li>▪ Softing PROFIdtm 업데이트 V2.24.00</li> <li>▪ 유량 검증 DTM 업데이트 V2.02.00</li> <li>▪ PROFINET CommDTM 업데이트 V1.01.00</li> <li>▪ 버그 수정</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FieldCare: 2.20.xx</li> <li>▪ DeviceCare: 1.08.xx</li> </ul>	KA01303S/04/EN/12.26-00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 새 PROFINET CommDTM을 통해 Siemens CFU-PA 지원</li> <li>▪ CDI USB용 새 드라이버(Windows 11 지원)</li> <li>▪ TXU10V2용 새 드라이버(Windows 11 지원)</li> <li>▪ 보안 개선(CodeMeter V8.40a)</li> <li>▪ 자동 DTM 및 드라이버 업데이트 활성화 또는 비활성화 가능</li> <li>▪ .NET 4.8이 설치 프로그램에 사용되며, 설치되어 있지 않은 경우 자동으로 설치됨</li> <li>▪ 버그 수정</li> </ul>






## 2 문서 정보





### 2.1 문서 기능

사용 설명서(요약본)은 입고 승인에서 최초 시운전에 이르는 모든 필수 정보를 제공합니다.

이 설명서는 소프트웨어의 설치와 업데이트에 필요한 모든 정보를 제공합니다.

### 2.2 사용 기호

기호	의미
	설치 관리자의 시작 페이지를 엽니다.
	언어 설정을 엽니다.
	소프트웨어에 관한 추가 정보
	애플리케이션을 종료합니다.
	열린 마지막 페이지로 다시 이동합니다.

기호	의미
	FieldCare, 모뎀, Fieldgate, Field Xpert 관련 정보.
	키보드를 엽니다.
	전체 화면.
	전체 화면을 종료합니다.

## 3 제품 설명

### 3.1 소프트웨어 기능


설치 관리자는 FieldCare 패키지 내에서 제공되는 모든 FieldCare 구성요소(프레임 애플리케이션, 드라이버, CommDTM 파일, DeviceDTM 파일, 도구)의 설치 과정을 안내합니다. 설치를 실행하려면 관리자 권한이 필요합니다.

### 3.2 소프트웨어 라이선스 관리(SLM)

#### 3.2.1 FieldCare SFE500 라이선스 모델

FieldCare는 기간 제한이 있는 무료 평가판 라이선스로 제공됩니다. 라이선스의 사용에는 라이선스 계약(EULA)이 적용됩니다. FieldCare를 영구적으로 사용하려면 FieldCare를 구매하고 제공된 소프트웨어 ID로 라이선스를 활성화해야 합니다.

FieldCare 라이선스 모델은 "플랜트 자산 관리"(PAM)라는 기본 모듈과 "상태 모니터링"이라는 확장 모듈로 구성됩니다. 라이선스는 PAM 모듈과 확장 모듈의 조합으로 구성됩니다.

 최신 FieldCare 버전을 사용하려면 소프트웨어 ID로 소프트웨어를 활성화해야 합니다. 이전 FieldCare 버전(< 2.15.00)의 라이선스 키는 최신 FieldCare 버전에 사용할 수 없습니다. 자세한 정보는 [www.endress.com/sfe500](http://www.endress.com/sfe500)에서 확인하거나 Endress+Hauser 세일즈 센터로 문의하십시오.

소프트웨어 라이선스 관리의 기능은 다음과 같습니다.

- 60일 동안 평가판 모드에서 소프트웨어 사용
- 소프트웨어의 영구 활성화(인터넷 연결과 무관)
- 라이선스 갱신
- 라이선스 반환

## 영구적으로 소프트웨어 활성화


전제 조건:

- 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되어 있습니다.
- 라이선스 계약(EULA)에 동의했습니다.

## 인터넷에 연결된 상태로 영구적으로 소프트웨어 활성화


전제 조건:

소프트웨어 ID를 사용할 수 있습니다.

 소프트웨어 ID는 FieldCare USB 스틱이 들어 있는 USB 상자의 라벨이나 제품 배송 시 Endress+Hauser에서 보낸 이메일에서 확인할 수 있습니다.

1. 소프트웨어를 시작하십시오.

↳ **Software activation** 창이 나타납니다.

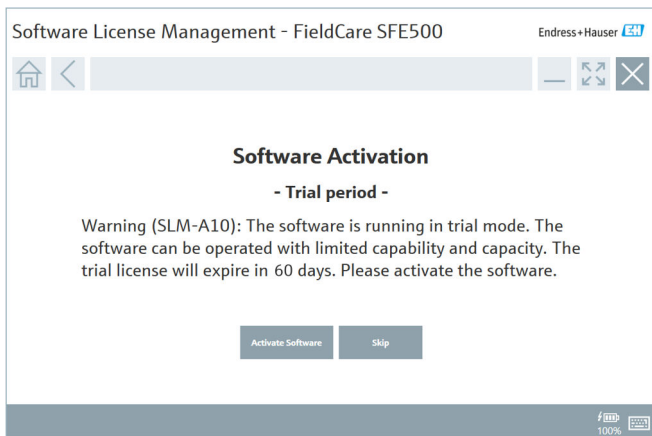

2. **Activate** 버튼을 클릭하십시오.

- ↳ 소프트웨어 ID를 입력하기 위한 **Software license management** 창이 나타납니다.

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress+Hauser **E+H**

Please enter the Software ID. The Software ID can be found on a label in the software package.

-  -  -  -

Continue Cancel

100%

3. 소프트웨어 ID를 입력하십시오.

- ↳ 기호를 통해 올바른 소프트웨어 ID를 입력했는지 확인합니다.

4. **Continue** 버튼을 클릭하십시오.

- ↳

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress+Hauser **E+H**

To activate the software you need access to the Software Portal. Please fill in your credentials or register to get a new account.

E-mail address


Password

[I have forgotten my password](#)

Activate Create Account Cancel

100%


5. Endress+Hauser 소프트웨어 포털 사용자 계정이 이미 있는 경우 이메일 주소와 암호를 입력하고 **Activate**를 클릭하십시오.  
↳ 소프트웨어가 성공적으로 활성화되면 다음 창이 나타납니다.

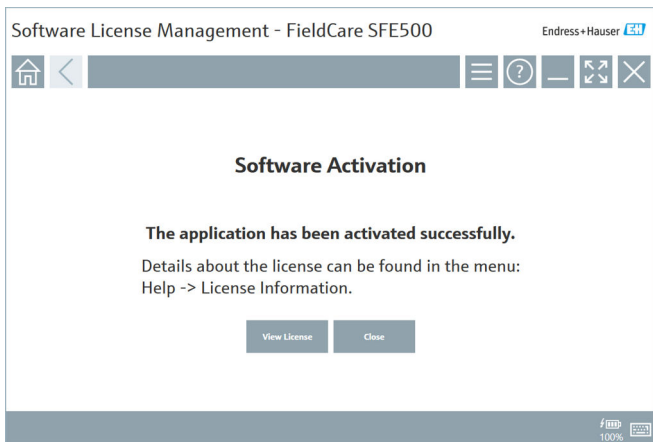

6. Endress+Hauser 소프트웨어 포털 사용자 계정이 아직 없으면 4단계로 돌아가서 **Create account** 버튼을 클릭하십시오.

활성화 후 라이선스 정보를 볼 수 있습니다.

## 1. Close 버튼을 클릭하십시오.

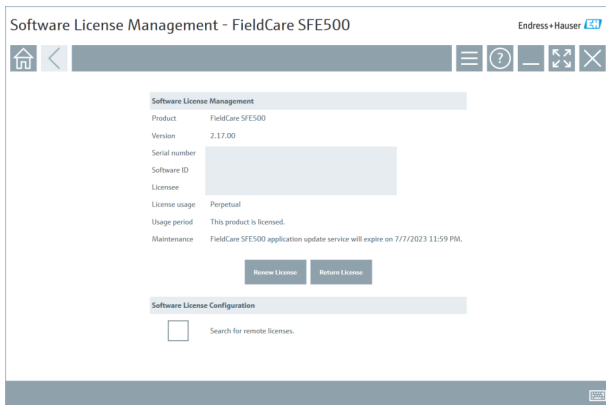

창에 일련 번호, 라이선스 사용자 등 모든 라이선스 관련 정보가 표시됩니다.

## 2. 창을 닫으려면 오른쪽 상단에 있는 X(ⓧ) 기호를 클릭하십시오.



잠시 후 **FieldCare** 프로그램이 시작됩니다.



### 소프트웨어 라이선스 구성

**Search for remote licenses** 확인란을 선택하거나 선택 해제할 수 있습니다. 이 옵션은 성능상의 이유로 제공됩니다. 확인란을 선택하면 컴퓨터가 라이선스 서버에서 제공하는 유효한 소프트웨어 라이선스를 네트워크에서 검색합니다. 확인란을 선택 해제하면 유효한 소프트웨어 라이선스가 컴퓨터에 로컬로 설치되어 있어야 합니다. 이 옵션은 컴퓨터가 네트워크에서 라이선스를 검색하지 못하도록 합니다.



필요한 경우 FieldCare 메뉴 **Help**와 **License information**을 통해 **Software license management** 기능을 열 수 있습니다.

## 인터넷 연결 없이 영구적으로 소프트웨어 활성화

컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 라이선스를 수동으로 활성화할 수도 있습니다.

전제 조건:

- 이동식 저장 장치(예: USB 스틱)
- 인터넷에 연결된 두 번째 컴퓨터


### 수동 활성화 프로세스

FieldCare가 설치되어 있지만 인터넷에 연결되지 않은 컴퓨터	USB 스틱	인터넷에 연결된 컴퓨터
"Software activation - Manual" 창		Endress+Hauser 소프트웨어 포털
<b>Step 1</b>		
<b>작업:</b> 라이선스 요청 파일 (*.EHR)을 USB 스틱에 저장하십시오.	=>	<b>1. Activation request</b>
		<b>작업:</b> USB 스틱에서 라이선스 요청 파일 (*.EHR)을 업로드하십시오.
		<b>2. License activation/update</b>
<b>Step 2</b>	<=	<b>작업:</b> 라이선스 업데이트 파일 (*.EHU)을 USB 스틱에 저장하십시오.
<b>작업:</b> USB 스틱에서 라이선스 업데이트 파일 (*.EHU)을 가져오십시오.		
<b>Step 3</b>		
<b>작업:</b> 라이선스 확인 파일 (*.EHC)을 USB 스틱에 저장하십시오.	=>	<b>3. Confirmation of license activation</b>
		<b>작업:</b> USB 스틱에서 라이선스 확인 파일 (*.EHC)을 업로드하십시오.

## 설명


1. 인터넷에 연결된 상태로 영구적으로 소프트웨어 활성화 섹션에서 설명하는 대로 1~4단계를 수행하십시오.

↳ Your client/server is not connected with the Internet 메시지와 함께 **Software activation** 창이 나타납니다.

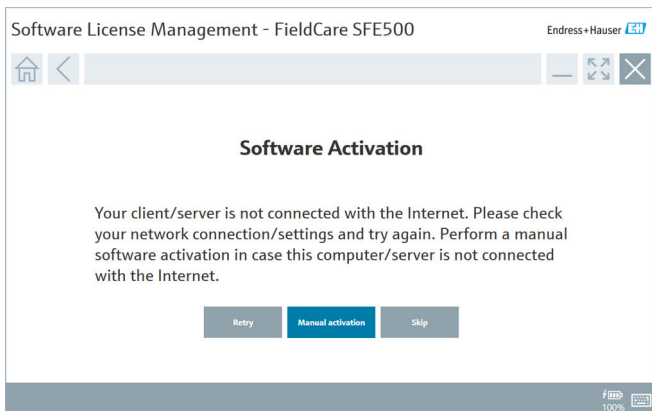


2. **Manual activation** 버튼을 클릭하십시오.

↳ **Software activation - manual** 창이 나타납니다.

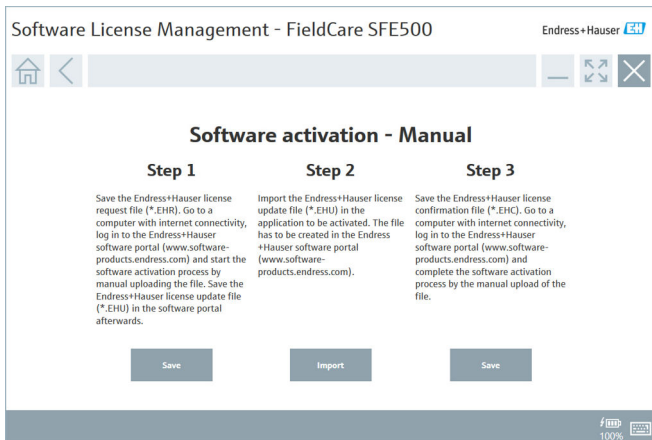


3. **Step 1**에서 **Save** 버튼을 클릭하십시오.  
↳ Windows 대화 상자 **Save as...**가 나타납니다.
4. 라이선스 요청 파일(\*.EHR)을 USB 스틱에 저장하십시오.
5. USB 스틱을 인터넷에 연결된 컴퓨터에 연결하십시오.
6. 인터넷에 연결된 컴퓨터에서 Endress+Hauser 소프트웨어 포털로 이동하십시오: <https://software-products.endress.com>
7. Endress+Hauser 소프트웨어 포털에 로그인하십시오.
8. **Activation/Update** 메뉴를 선택하십시오.  
↳ 다음 보기가 표시됩니다.

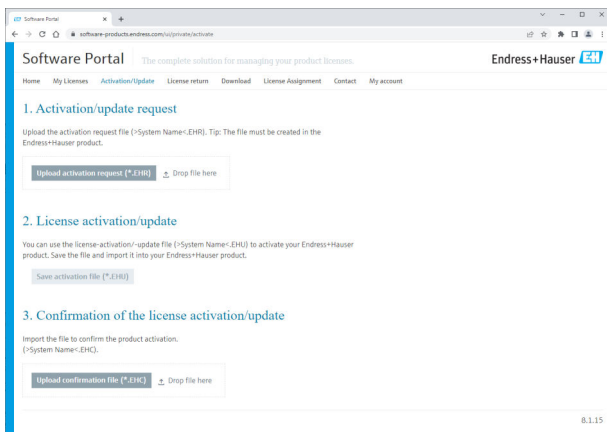

9. **1. Activation request**에서 **Upload** 버튼을 클릭하십시오.
10. USB 스틱에서 라이선스 요청 파일(\*.EHR)을 업로드하십시오.  
↳ 업로드가 성공하면 **The activation request file has been successfully processed** 메시지가 나타납니다. **Software activation - Manual** 창에서 **Step 2**를 계속하십시오.

11. **OK**를 클릭해 메시지를 확인하십시오.

↳ 활성화 파일 **\*.EHU**의 이름이 표시됩니다:

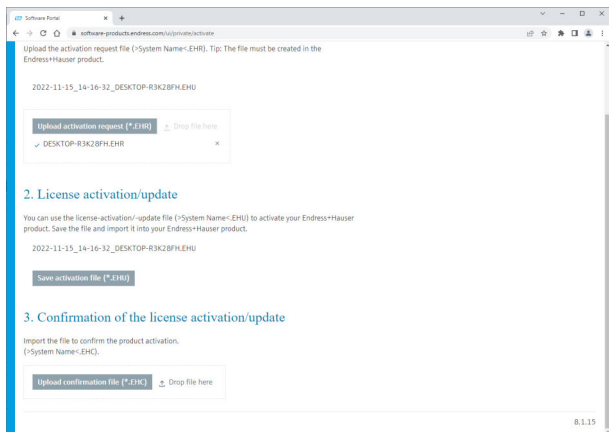

12. **Save** 버튼을 클릭하십시오.

13. 라이선스 업데이트 파일 (\*.EHU)을 USB 스틱에 저장하십시오.

14. FieldCare가 설치된 컴퓨터(인터넷에 연결되지 않음)에 USB 스틱을 연결하십시오. Endress+Hauser 소프트웨어 포털에서 로그아웃하지 마십시오. 인터넷에 연결되지 않은 컴퓨터에 **Software activation - manual** 창이 계속 표시됩니다.

15. **Step 2**에서 **Import** 버튼을 클릭하십시오.

16. USB 스틱에서 이전에 저장한 라이선스 업데이트 파일 (\*.EHU)을 업로드하십시오.

17. **Step 3**에서 **Save** 버튼을 클릭하십시오.

↳ Windows 대화 상자 **Save as...**가 나타납니다.


18. 라이선스 확인 파일 (\*.EHC)을 USB 스틱에 저장하십시오.

19. 창을 닫으려면 오른쪽 상단에 있는 X(☒) 기호를 클릭하십시오.

↳ 잠시 후 **FieldCare** 프로그램이 시작됩니다.

20. USB 스틱을 인터넷에 연결된 컴퓨터에 연결하십시오. Endress+Hauser 소프트웨어 포털에 계속 로그인되어 있습니다.

## 21. 3. Confirmation of the license activation으로 이동하십시오.

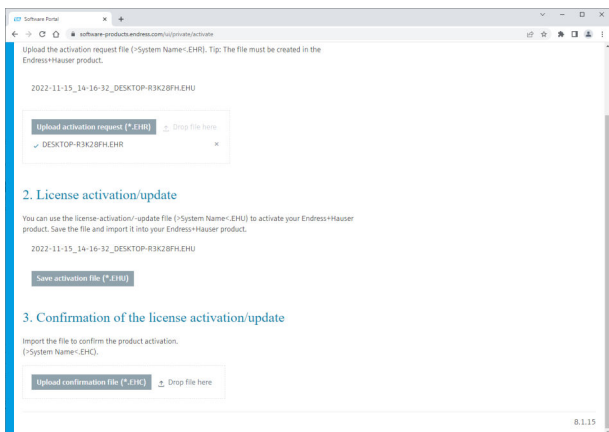

## 22. Upload 버튼을 클릭하십시오.

## 23. USB 스틱에서 저장한 라이선스 확인 파일 (\*.EHC)을 업로드하십시오.

↳ 업로드가 성공하면 **The activation of the product has been confirmed successfully** 메시지가 나타납니다.

## 24. OK를 클릭해 메시지를 확인하십시오.

이제 FieldCare가 영구적으로 활성화되었습니다. Endress+Hauser 소프트웨어 포털의 **Products**에서 라이선스 상태와 라이선스 정보를 확인할 수 있습니다.


## 소프트웨어 라이선스 업데이트

전제 조건:

- 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되어 있습니다.
- 소프트웨어 라이선스가 있습니다.


1. FieldCare 메뉴 **Help** -> **License information**을 통해 **Software license management** 기능을 여십시오.

↳ 다음 창이 나타납니다:

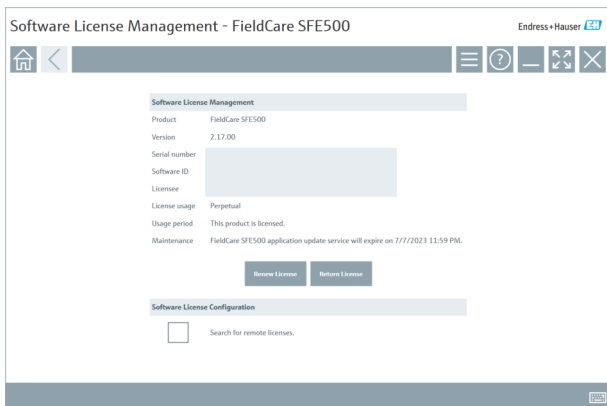


2. **Renew license** 버튼을 클릭하십시오.

↳ **Login to software portal** 창이 나타납니다.

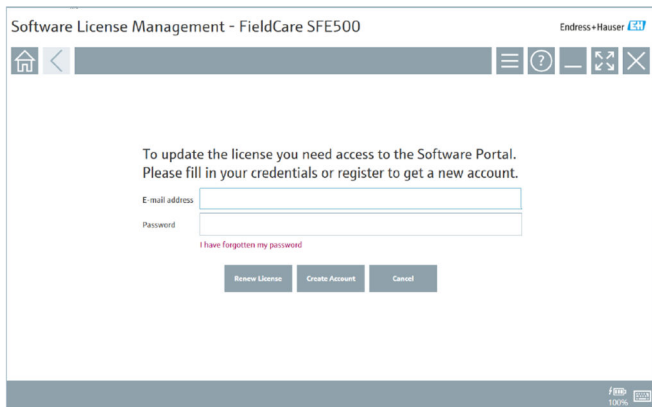

- 이메일 주소와 암호를 입력한 다음 **Renew License**를 클릭하십시오.  
↳ 소프트웨어가 성공적으로 활성화되면 다음 창이 나타납니다.

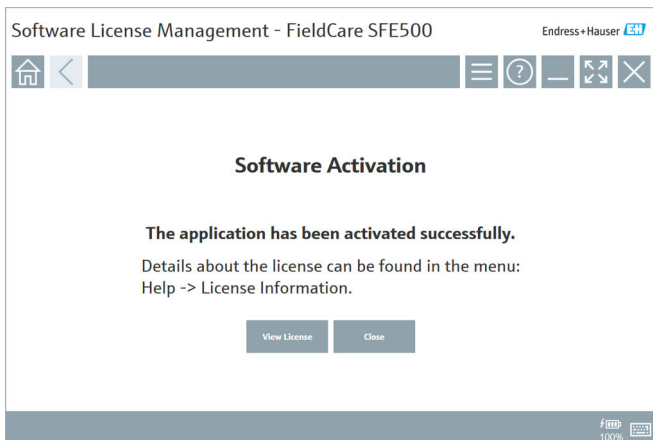

- Endress+Hauser 소프트웨어 포털 사용자 계정이 아직 없으면 먼저 Step 2에서 **Create account** 버튼을 클릭하십시오.


## 소프트웨어 라이선스 반환

전제 조건:

- 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되어 있습니다.
- 소프트웨어 라이선스가 있습니다.


1. FieldCare 메뉴 **Help**와 **License information**을 통해 **Software License Management** 기능을 여십시오.

↳ 다음 창이 나타납니다:

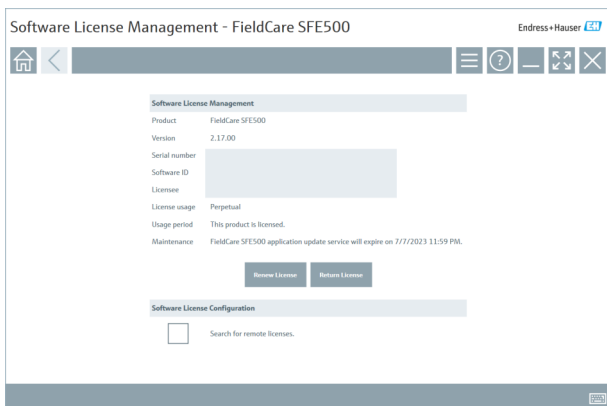

2. **Return license** 버튼을 클릭하십시오.


↳ **Login to software portal** 창이 나타납니다.

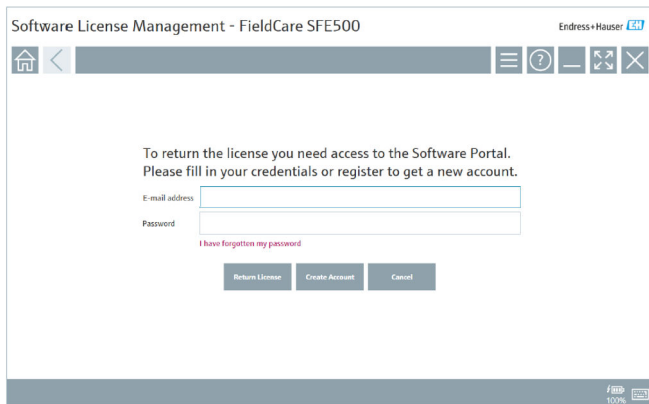


3. 이메일 주소와 암호를 입력한 다음 **Return License**를 클릭하십시오.

↳ 소프트웨어가 성공적으로 반환되면 **The software has been successfully returned** 메시지가 표시된 **Return license** 창이 나타납니다.

## 4 설치

 일부 구성요소는 설치하는 데 시간이 오래 걸립니다. 문제를 방지하려면 취소 요청이 없는 한 설치를 취소하지 마십시오.

### 4.1 시스템 요구 사항

 설치하기 전에 필요한 소프트웨어(예: Microsoft.NET 3.5/4.x 및 PDF Reader)를 설치하십시오.

데이터베이스 모드에서 2.10.xx 이하의 FieldCare 버전은 데이터 보관을 위해 SQL Server 2008을 사용합니다. 2.11.xx 이상의 FieldCare 버전은 데이터베이스가 SQL Server 2014 이상으로 업데이트된 경우 Windows 10과 호환됩니다. 2.18 이상의 버전의 경우, FieldCare가 설치될 때마다 Microsoft SQL Server 2022 Express가 함께 설치됩니다.

Windows 11 운영 체제에서는 FieldCare 2.20을 새로 설치할 것을 권장합니다. FieldCare 2.20의 경우 Windows 11에서 요구되는 Microsoft SQL Server 2022 Express가 자동으로 설치됩니다.

#### 버전 2.20.xx에서 지원하는 설치 및 업데이트 시나리오:

설치된 운영 체제	설치된 SQL 서버	FieldCare 데이터베이스 <sup>1)</sup>	FieldCare	방법
Windows 10	SQL Server가 설치되지 않음	데이터베이스가 설치되지 않음	설치되지 않음	<ul style="list-style-type: none"><li>SQL Server 2022를 포함해 FieldCare 2.20.xx를 설치합니다.</li><li>FieldCare 데이터베이스가 설치됩니다.</li></ul>
Windows 10	SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2019 또는 SQL Server 2022	데이터베이스가 설치되지 않음	설치되지 않음	<ul style="list-style-type: none"><li>FieldCare 2.20.xx를 설치합니다.</li><li>기존의 SQL Server를 사용합니다.</li><li>FieldCare 데이터베이스가 설치됩니다.</li></ul>

설치된 운영 체제	설치된 SQL 서버	FieldCare 데이터베이스 <sup>1)</sup>	FieldCare	방법
Windows 10	SQL Server 2014	데이터베이스가 설치됨	설치되지 않았거나 이전 버전임	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FieldCare 2.20.xx를 설치합니다.</li> <li>▪ 기존의 SQL Server를 사용합니다.</li> <li>▪ 기존 FieldCare 데이터베이스가 사용됩니다.</li> </ul>
Windows 11	SQL Server가 설치되지 않음	데이터베이스가 설치되지 않음	설치되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SQL Server 2022를 포함해 FieldCare 2.20.xx를 설치합니다.</li> <li>▪ FieldCare 데이터베이스가 설치됩니다.</li> </ul>

- 1) SQL Server에는 데이터 보관을 위해 FieldCare에서 사용할 수 있는 데이터베이스가 포함되어 있습니다.




FieldCare 설정은 Windows 버전 업그레이드와 관련된 설치를 지원하지 않습니다.

## 4.2 소프트웨어 설치

1. FieldCare USB 스틱을 USB 포트에 삽입하고 Windows 파일 관리자를 사용해 루트 디렉터리로 이동하십시오.

## 2. FieldCare 설치 프로그램(InstallationManager.exe)을 시작하십시오.

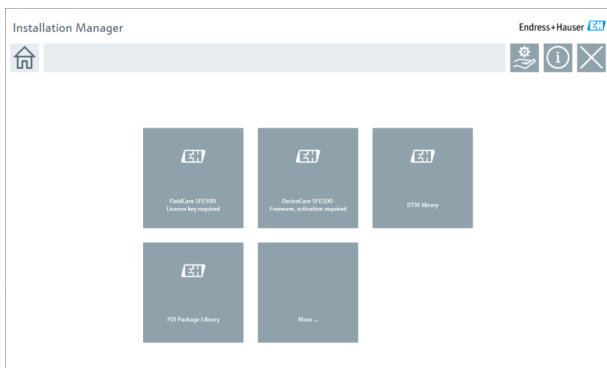


설치 관리자 시작 페이지의 옵션:

- FieldCare SFE500 설치 → 19
- DeviceCare SFE100 설치 → 22
- DTM 라이브러리 설치 → 23
- FDI Package 라이브러리 설치 → 26
- 기타 → 26

### 4.2.1 FieldCare SFE500 설치


#### 1. 설치 관리자 시작 페이지에서 FieldCare SFE500을 클릭하십시오.

↳ "EULA" 탭이 열립니다.

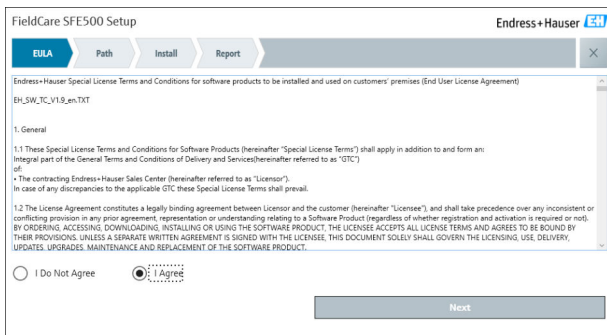


2. **I agree**를 선택해 라이선스 계약에 동의하고 **Next**를 클릭하십시오.

↳ "Path" 탭이 열립니다.

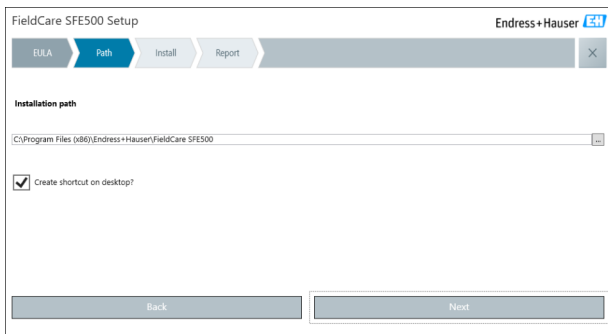


3. 설치 경로를 선택하고 **Next**를 클릭하십시오.

↳ "Install" 탭이 열리고 **FieldCare**가 설치됩니다.

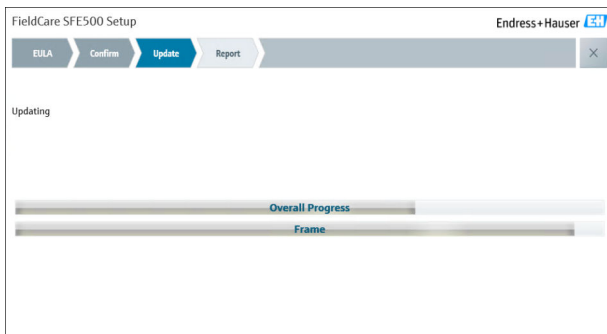

설치 후 "Report" 탭이 열립니다.

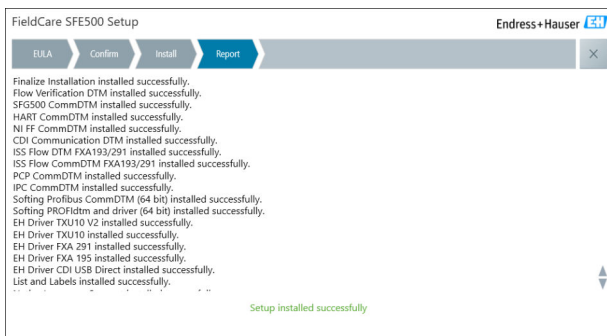

4. 대화 상자를 닫으십시오.




FieldCare 설치 후 데이터베이스 암호를 변경해야 합니다. 데이터베이스의 기본 암호는 사용할 수 없습니다.

## 4.2.2 DeviceCare SFE100 설치


1. 설치 관리자 시작 페이지에서 **DeviceCare SFE100**을 클릭하십시오.

↳ "EULA" 탭이 열립니다.

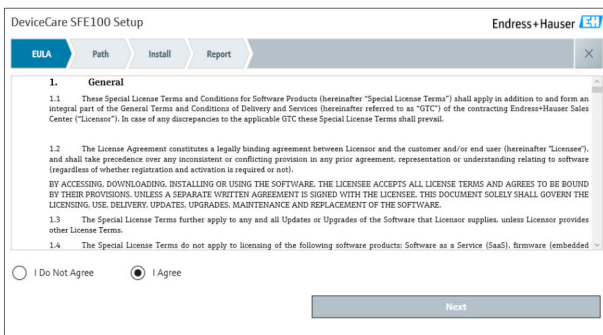


2. **I agree**를 선택해 라이선스 계약에 동의하고 **Next**를 클릭하십시오.

↳ "Path" 탭이 열립니다.

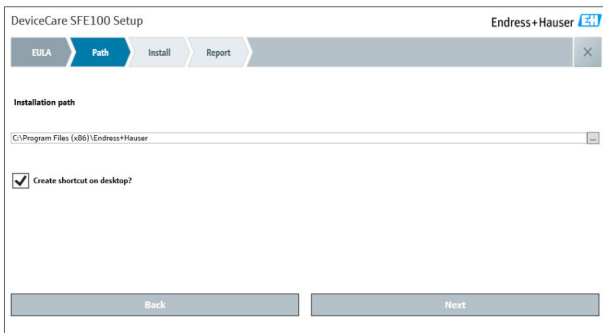


3. 설치 경로를 선택하고 **Next**를 클릭하십시오.

↳ "Install" 탭이 열리고 **DeviceCare** 설치가 시작됩니다.

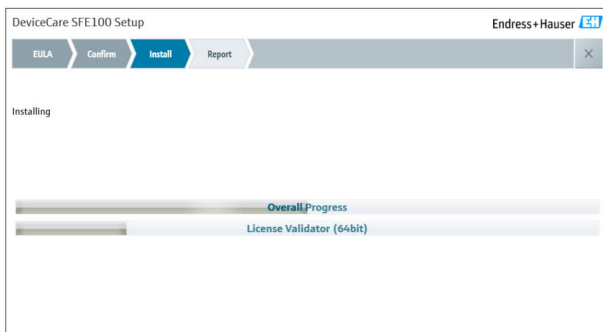

설치 후 "Report" 탭이 열립니다.

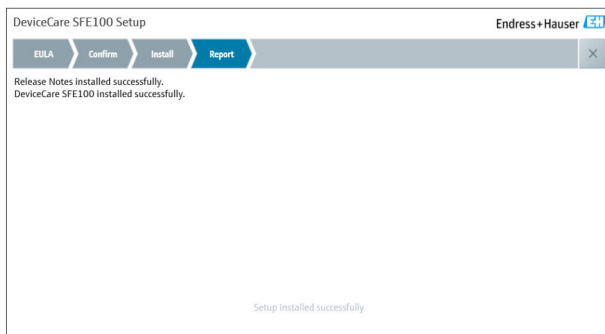

4. 대화 상자를 닫으십시오.


#### 4.2.3 DTM 라이브러리



계기에 액세스하려면 필요한 DTM 및 DTM 라이브러리를 선택해 설치해야 합니다.


1. 설치 관리자 시작 페이지에서 **DTM library**를 클릭하십시오.

↳ "Welcome" 탭이 열립니다.

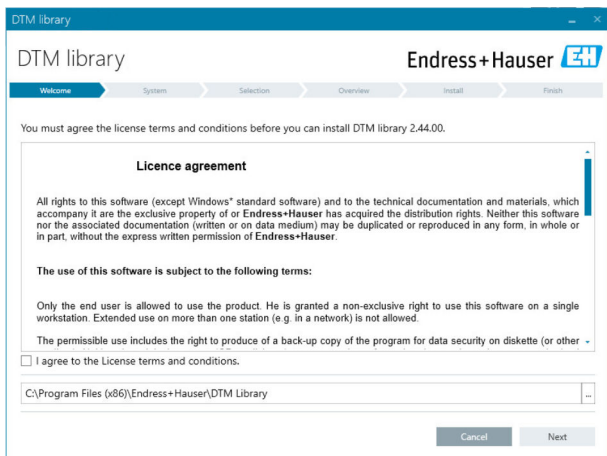


2. 라이선스 조건에 동의하고 **Next**를 클릭하십시오.

↳ "System" 탭이 열립니다.

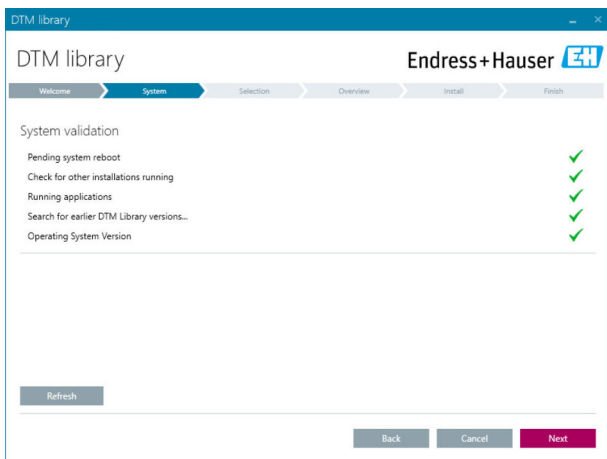


3. **Next**를 클릭하십시오.

↳ "Selection" 탭이 열립니다.

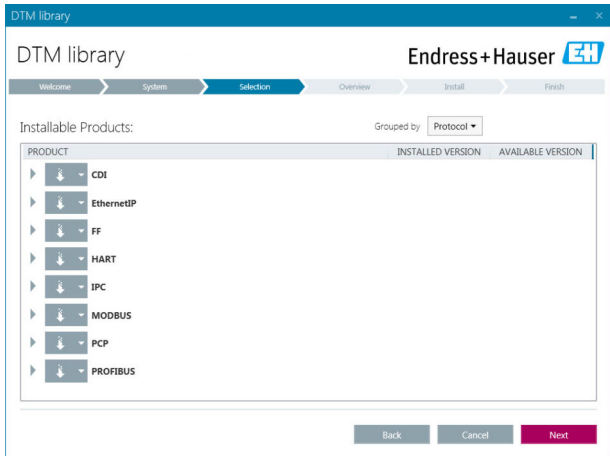

4. 설치해야 할 제품을 선택하고 **Next**를 클릭하십시오.

↳ "Overview" 탭이 열립니다.

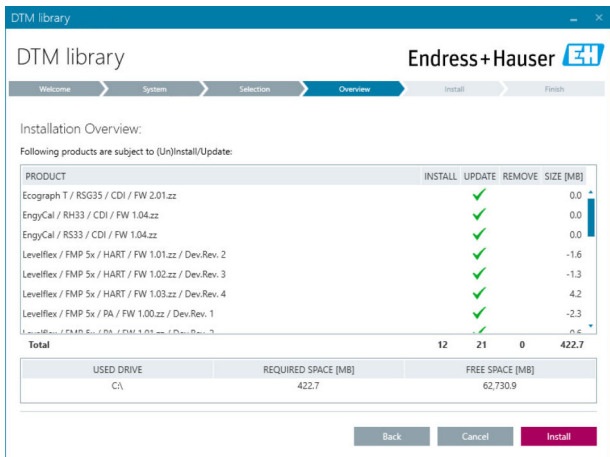


5. **Install**을 클릭하십시오.

↳ DTM 라이브러리 설치가 시작되고 설치 성공 메시지가 나타납니다.

6. **Close**를 클릭하십시오.

↳ 설치 관리자의 시작 페이지가 열립니다.

#### 4.2.4 FDI Package 라이브러리

 FDI Package를 기기 드라이버로 사용해 계기에 액세스하려면 먼저 필수 FDI Package 또는 FDI Package 라이브러리를 설치해야 합니다.


1. 설치 관리자 시작 페이지에서 **FDI Package library**를 클릭하십시오.

2. 설치 지침을 따르십시오.

#### 4.2.5 기타


▶ 설치 관리자 시작 페이지에서 **More**를 클릭하십시오.

↳ 선택 옵션이 표시된 대화 상자가 열립니다.

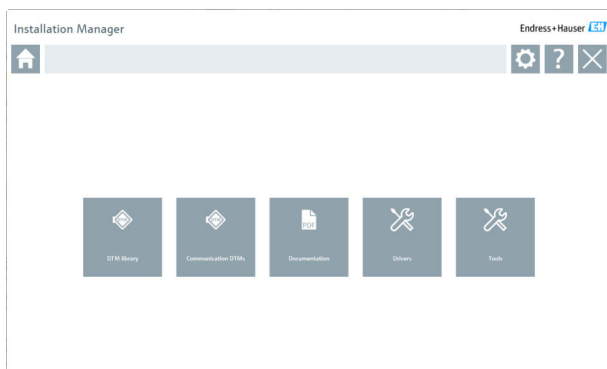


## DTM 라이브러리

- ▶ **DTM library**를 클릭하십시오.
- ↳ 사용 가능한 모든 DTM이 표시됩니다.

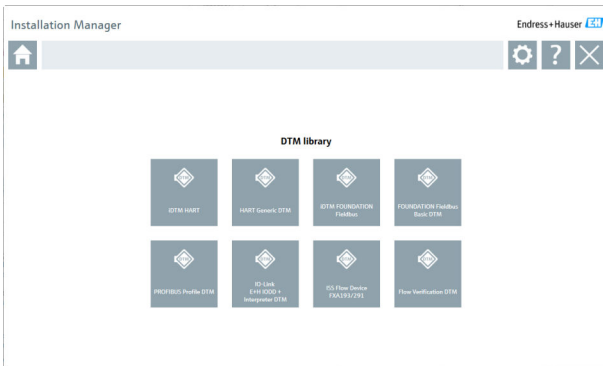


## 통신/게이트웨이 DTM

- ▶ **Communication/Gateway DTM**을 클릭하십시오.
- ↳ 사용 가능한 모든 통신/게이트웨이 DTM이 표시됩니다.

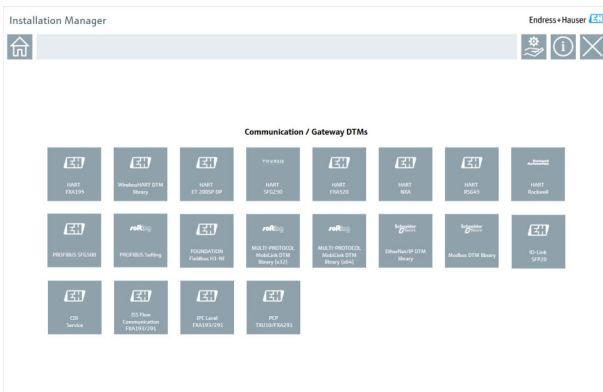


## 문서

- ▶ **Documentation**을 클릭하십시오.
  - ↳ 모든 문서가 PDF로 표시됩니다.

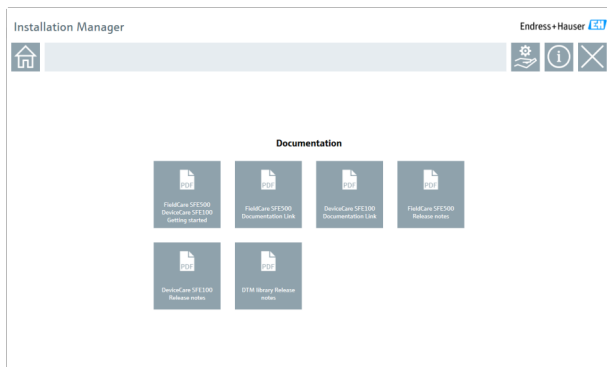


## 드라이버

- ▶ **Drivers**를 클릭하십시오.
  - ↳ 사용 가능한 모든 드라이버가 표시됩니다.

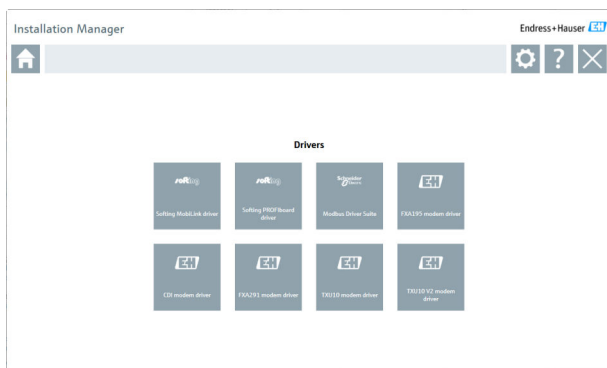

## 도구

- ▶ **Tools**을 클릭하십시오.
  - ↳ 사용 가능한 모든 도구가 표시됩니다.

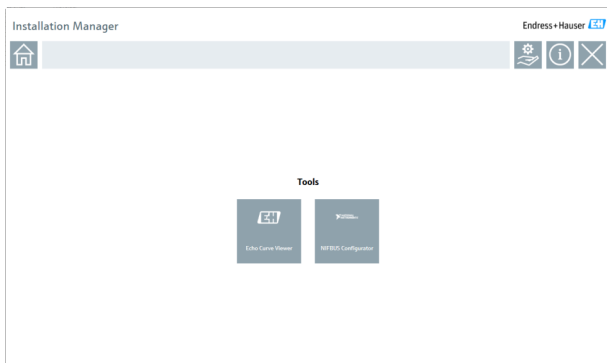

## 4.3 소프트웨어 업데이트

- i** Endress+Hauser는 FieldCare의 업데이트 계약을 제공합니다.  
자세한 정보는 Endress+Hauser 세일즈 센터에 문의하십시오.

### **i** 소프트웨어 업데이트 서비스

유지보수 기간은 라이선스 생성과 함께 시작되어 1년(만료일) 후에 자동으로 종료됩니다. 소프트웨어 업데이트 서비스를 구매한 시기에 관계없이 추가로 구매한 소프트웨어 업데이트 서비스는 마지막 만료일부터 중단 없이 계속됩니다. 만료일 이후에 구매한 경우 새로운 유지보수 기간에는 만료일과 구매한 소프트웨어 업데이트 서비스의 생성 사이에 발생한 서비스 공백이 포함됩니다.


또한 유효한 활성 유지보수 기간 내에 소프트웨어 릴리스가 공개된 경우 나중에 소프트웨어 업데이트를 활성화할 수도 있습니다.

## 제품 정보 구독

1. 웹 브라우저에서 <https://software-products.endress.com>에 들어가십시오.
2. 소프트웨어 포털에 로그인하십시오.

3. 소프트웨어 포털에서 **My account**를 클릭하십시오.

↳ "My account" 대화 상자가 나타납니다.

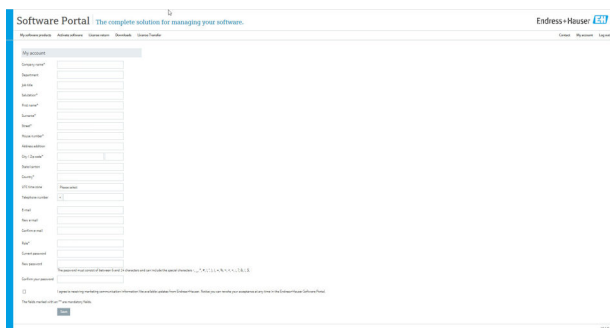

4. 아래로 스크롤해 **I agree to receiving marketing communication information like available updates from Endress+Hauser** 를 선택하고 **Save**를 클릭하십시오.

↳ 제품 정보에 구독되었습니다.

## 4.4 계기 카탈로그 업데이트

**i** 새 DTM 또는 FDI Package를 설치한 후 FieldCare 계기 카탈로그를 업데이트 해야 합니다.

전제 조건:

- FieldCare가 설치되어 있습니다.
- 소프트웨어 ID를 입력했고 소프트웨어가 활성화되었습니다.
- DTM 또는 FDI Package가 설치되어 있습니다.

1. FieldCare에서 **Device catalog**와 **Update**를 클릭하십시오.

↳ "Update device catalog" 대화 상자가 나타납니다. 왼쪽 창에는 계기 카탈로그에 포함되지 않은 DTM 또는 FDI Package가 표시됩니다. 오른쪽 창에는 계기 카탈로그에 포함된 DTM 또는 FDI Package가 표시됩니다.

2. **Update**를 클릭하십시오.

↳ 설치된 계기 드라이버가 업데이트됩니다.

3. 오른쪽 마우스 버튼을 사용해 왼쪽 창을 클릭하고 **Add all to DTM catalog**를 선택하십시오.

↳ DTM, iDTM 및 FDI Package가 계기 카탈로그에 추가됩니다.

4. **OK**를 클릭하십시오.

↳ 변경 사항이 적용되고 대화 상자가 닫힙니다.





71762783

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---

KA01303S/46/KO/12.2.6-00  
71762783